



BEZIRKSKLINIKUM MAINKOFEN – 94469 DEGGENDORF

MTS Moderne TherapieSysteme GmbH
Stettiner Str. 4

49176 Hilter

**PFLEGEDIENST-
LEITUNG**

PFLEGEDIREKTION

DEGGENDORF, 18.03.2008

IHRE NACHRICHT VOM/
IHRE ZEICHEN:

UNSER ZEICHEN:

Soft Landing Strip

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Bezirksklinikum Mainkofen versorgt mit insgesamt 680 Betten den Bezirk Niederbayern mit den Fachgebieten Psychiatrie, Psychosomatik, forensische Psychiatrie, Neurologie und neurologische Rehabilitation.

Das Thema „Sturzgefahr bei älteren Menschen“ ist für uns sehr wichtig. Wir beschäftigen uns mit prophylaktischen Maßnahmen, damit Stürze und daraus folgende Verletzungen verhindert werden. Dabei ist immer abzuwägen, inwieweit eine Gefahr zu Stürzen eine mechanische Behinderung ethisch und rechtlich begründet. Klar ist auch, dass man Stürze nie zu 100% verhindern kann.

Im Zuge des Einsatzes von Niedrigbetten stellte sich uns die Frage, wie sich das Verletzungsrisiko beim Fall aus einem Niedrigbett auf ein Minimum reduzieren lässt.

Dabei stießen wir auf den Soft Landing Strip der Firma MTS. In einer mehrwöchigen Testphase probierten wir die Kombination Niedrigbett und Soft Landing Strip aus.. Die Kombination aus Niedrigbett und Soft Landing Strip stellte für uns eine ideale Lösung zur sicheren und menschenwürdigen Betreuung von sturzgefährdeten Patienten dar. Der Test verlief positiv und wir sahen folgende Vorteile in dem Produkt der Firma MTS:

1. Durch die abgeflachten Kanten trat keine Behinderung der täglichen pflegerischen Arbeit auf.

VERMITTLUNG
☎ 09931/870

SEKRETARIAT:
☎ 09931/87508 DURCHWAHL
📄 09931/87505

E-MAIL:

g.kellner@mainkofen.de

HAUSANSCHRIFT:

MAINKOFEN A 6
94469 DEGGENDORF



www.mainkofen.de

2. Der Soft Landing Strip ist ohne Probleme begehbar und auch mit einem Rollstuhl befahrbar und kann so die ganze Zeit über vor dem Bett verbleiben.
3. Durch das Antirutsch-Material auf der Unterseite bestand keine Gefahr wegzurutschen beim Mobilisieren o. ä.
4. Es hat sich gezeigt, dass Patienten, die sogar aus einem normal hohen Bett gestürzt sind, sich nicht verletzt haben.
5. Die Oberfläche ist einfach und hygienisch einwandfrei zu reinigen.

Diese Vorteile haben uns zur Kaufentscheidung bewogen und wir haben alle unsere Niedrigbetten mit Soft Landing Strips ausgestattet.

Wir setzen den Soft Landing Strip im gerontopsychiatrischen und neurologischen Bereich ein. Wegen der guten Erfahrungen mit dem Einsatz des Soft Landing Strips und dem steigenden Bedarf haben wir inzwischen auch schon Soft Landing Strips nachgekauft.

Es gibt kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Zur Umsetzung einer ethisch vertretbaren und trotzdem sicheren Pflege von sturzgefährdeten Patienten gibt es meiner Meinung nach kein besseres Hilfsmittel.

Hartl Hans Peter
Pflegedienstleitung
Bereich Gerontopsychiatrie